


如何開始使用？

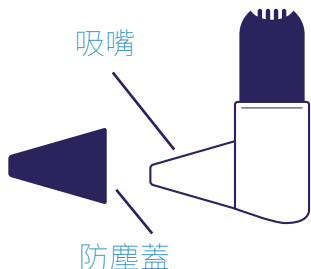

- ▶ 每個全新的 Easyhaler® 裝置都會以鋁箔袋包裝，以保持藥粉乾燥。
- ▶ 在您準備開始使用 Easyhaler® 吸入器之前，請勿打開包裝袋。
- ▶ Easyhaler® 裝置設有一個吸嘴，吸嘴附有可拆卸的防塵蓋。
- ▶ 當您不使用 Easyhaler® 裝置時，請務必將防塵蓋蓋在吸嘴上。這樣可以防止任何藥物的意外洩漏。

EASYHALER® 使用說明影片




掃描二維碼

掃描此頁面上的二維碼，即可觀看 Easyhaler® 的使用說明影片。

您也可以 Easyhaler® 裝置標籤的側面、包裝紙盒上和包裝隨附單張上找到二維碼。

或者，您也可以造訪 www.oeh.fi/uk 查看此內容。

如何使用 EASYHALER® 服用藥劑？

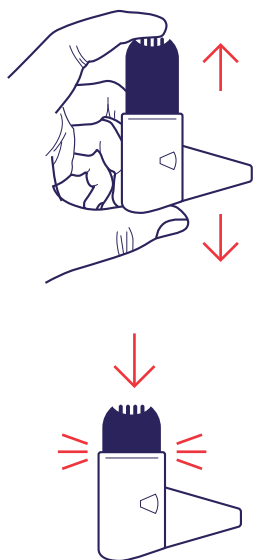

1. 搖一搖


- ▶ 取下防塵蓋。
- ▶ 將吸入器夾在食指和拇指之間。
- ▶ **將吸入器** 直立搖晃 3-5 次。

2. 按下


- ▶ **向下按壓**，直到聽見咔嚓聲。
- ▶ 然後讓它回到原來的位

3. 吸入

- ▶ 在不使用本裝置時，正常呼氣。
- ▶ 將吸入器的吸嘴放入口中，並用嘴唇緊緊含住吸嘴。
- ▶ **用力深吸一口氣。**
- ▶ 將吸入器從嘴裡取出，屏住呼吸至少 5 秒鐘。
- ▶ 正常呼氣。
- ▶ 如果您的處方要求服用超過一劑的劑量，請在每次使用吸入器時重複步驟 1 至 3。使用完畢後，請將防塵蓋蓋回到吸嘴上。
- ▶ 如果您的 Easyhaler® 裝置含有吸入性皮質類固醇（預防控制劑），請務必用水沖洗口腔和咽喉，然後吐出。請勿吞下。這樣有助於降低口腔真菌感染（鵝口瘡）的風險。

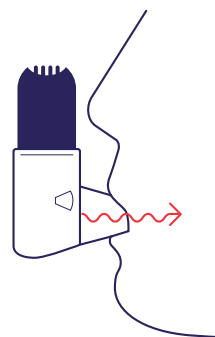


保護蓋

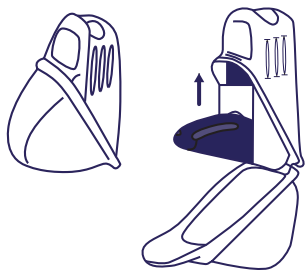


- ▶ 保護蓋為選裝配件。請打開保護蓋，並將吸入器插入其中。
- ▶ 使用保護蓋時，請先打開蓋子，然後按照步驟操作：**1. 搖一搖, 2. 按下, 然後 3. 吸入**
- ▶ 蓋上防塵蓋，然後關上保護蓋。

清潔

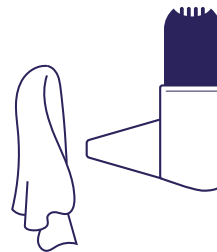

- ▶ 使用乾淨的乾布或面紙清潔吸嘴。
- ▶ 請勿使用水或其他液體清潔您的 Easyhaler®。吸入器內的藥粉對濕氣敏感。
- ▶ 如果您使用保護蓋，則無需取下吸入器即可清潔吸嘴。

在以下情況下該怎麼辦

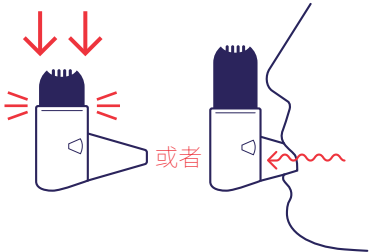

您按壓了不止一次？

- ▶ 您是否不小心按壓了吸入器？請務必只按壓一次，以確保正確的劑量。

您是否對著吸入器中呼氣？

- ▶ 您是否對著吸入器內吸氣？請避免向吸入器吸嘴中吹氣，因為這可能會使吸入器堵塞。


解決方式

清空吸嘴！

- ▶ 輕敲吸嘴，將藥粉倒在桌面或手掌上。
- ▶ 然後按照以下步驟重新開始使用：**1. 搖一搖, 2. 按下, 然後 3. 吸入。**



買一個新的 EASYHALER

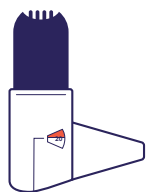

劑量計數器

- ▶ 吸入器側面有一個劑量計數器。這將顯示您的裝置中還剩下多少劑量。
- ▶ 每服用 5 次劑量後計數器會轉動一次，顯示的數字以 10 為單位減少。
- ▶ 當劑量計數器變成紅色時，表示還剩下 20 劑。如果您還沒有新的吸入器，請聯絡您的醫師以取得新的處方。
- ▶ **當計數器達到 0 時，您必須更換吸入器。**
- ▶ 如果使用保護蓋，請勿丟掉，留著搭配下一個吸入器一起使用。

如果出現任何副作用，請諮詢您的醫師、藥劑師或護士。這包括任何藥品隨附單張中未列出的可能副作用。您也可以透過黃卡計畫 (Yellow Card Scheme) 直接報告副作用：www.mhra.gov.uk/yellowcard。報告副作用可以協助提供更多有關藥物安全性的資訊。



本材料採用再生紙製作

2025 年 2 月 / EASYH-2018(2)a

Orion Pharma (UK) Ltd, Abbey Gardens,
4 Abbey Street, Reading, RG1 3BA, UK