


INSTRUCCIONES PARA USAR SU DISPOSITIVO EASYHALER®




Para obtener más información sobre cómo utilizar y conservar Easyhaler®, consulte el prospecto.

¿CÓMO EMPEZAR?

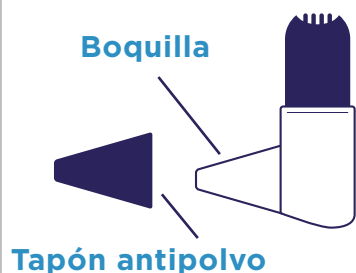

- ▶ Todos los nuevos dispositivos Easyhaler® se proporcionan en una bolsa de aluminio para mantener el polvo seco.
- ▶ No abra la bolsa hasta que vaya a comenzar a usar el inhalador Easyhaler®.
- ▶ El dispositivo Easyhaler® tiene una boquilla con un tapón antipolvo de quita y pon.
- ▶ Asegúrese de que el tapón antipolvo cubra la boquilla de su dispositivo Easyhaler® cuando no lo esté utilizando. Esto evitará la liberación accidental del medicamento.

VÍDEO CON LAS INSTRUCCIONES DE EASYHALER®

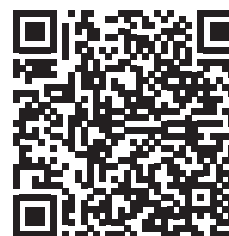


ESCANÉEME

Escanee el código QR de esta página para ver el vídeo sobre cómo utilizar el dispositivo Easyhaler®.

También puede encontrar códigos QR en el lateral de la etiqueta de su dispositivo Easyhaler®, en la caja de cartón y en el prospecto.


Asimismo, consulte el sitio web www.oeh.fi/uk para ver este contenido.

¿CÓMO TOMAR UNA DOSIS DE SU EASYHALER®?

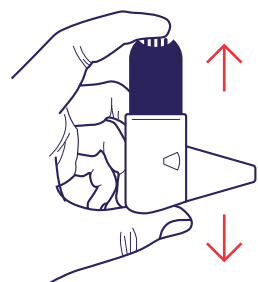


1. AGITAR

- ▶ Retire el tapón antipolvo.
- ▶ Coloque el inhalador entre el dedo índice y el pulgar.
- ▶ **Agite el inhalador** en posición vertical de 3 a 5 veces.

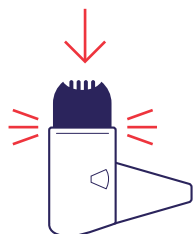

2. HACER CLIC


- ▶ **Presione hacia abajo** hasta que escuche un clic.
- ▶ Luego déjelo volver a su posición original.

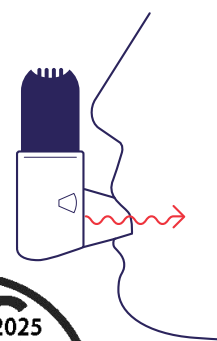

3. INHALAR


- ▶ Exhale como de costumbre apartándose el dispositivo.
- ▶ Colóquese la boquilla del inhalador en la boca, cerrando los labios con firmeza alrededor de la boquilla.
- ▶ **Inhale fuerte y profundamente.**
- ▶ Retírese el inhalador de la boca y contenga la respiración durante al menos 5 segundos.
- ▶ Exhale como de costumbre.
- ▶ Si su prescripción dice que tome más de una dosis, repita los pasos 1 a 3 cada vez que use el inhalador. Una vez que haya terminado, vuelva a colocar el tapón antipolvo en la boquilla.
- ▶ Si su dispositivo Easyhaler® contiene un corticosteroide inhalado (preventivo), asegúrese de enjuagarse la boca y la garganta con agua y escupirla. No tragar. Esto ayudará a reducir el riesgo de infección fúngica oral (candidiasis).

CUBIERTA PROTECTORA

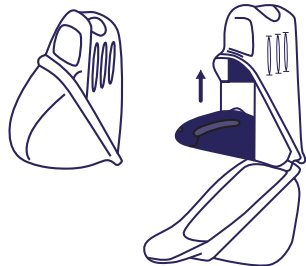


- ▶ Es opcional utilizar una cubierta protectora. Abra la cubierta protectora e inserte el inhalador en ella.
- ▶ Si utiliza una cubierta protectora, ábrala y siga estos pasos:
1. Agitar; 2. hacer clic y 3. inhalar
- ▶ Vuelva a colocar el tapón antipolvo y luego cierre la cubierta protectora.

LIMPIEZA

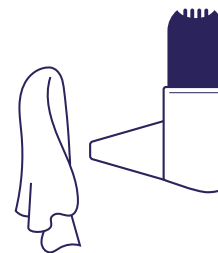

- ▶ Limpie la boquilla con un paño o pañuelo limpio y seco.
- ▶ No utilice agua ni otros líquidos para limpiar el dispositivo Easyhaler®. El polvo dentro del inhalador puede ser sensible a la humedad.
- ▶ Si utiliza una cubierta protectora, no es necesario quitar el inhalador para limpiar la boquilla.

¿QUÉ HACER CUANDO...

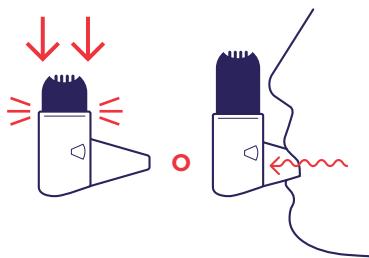


SE HACE CLIC MÁS DE UNA VEZ?

- ▶ ¿Ha hecho clic en el inhalador sin querer? Es importante hacer clic solo una vez para garantizar recibir la dosis adecuada.

HA EXHALADO EN EL INHALADOR?

- ▶ ¿Ha exhalado **DENTRO** del inhalador? Es importante que no exhale dentro de la boquilla del inhalador, ya que podría obstruirlo.

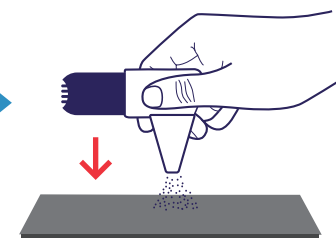


SOLUCIÓN

¡VACÍE LA BOQUILLA!

- ▶ Dele golpecitos con el dedo a la boquilla para vaciar el polvo sobre una mesa o en la palma de la mano.
- ▶ Luego comience de nuevo con los pasos:
1. Agitar; 2. hacer clic y 3. inhalar.

CONSEGUIR UN NUEVO EASYHALER

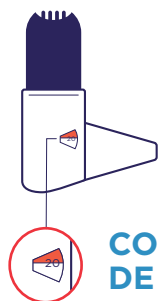

CONTADOR DE DOSIS

- ▶ El inhalador tiene un contador de dosis en el lateral. El contador le muestra cuántas dosis quedan en el dispositivo.
- ▶ El contador gira cada 5 dosis y el número mostrado disminuye en unidades de 10.
- ▶ Cuando el contador de dosis se ponga rojo, significa que quedan 20 dosis. Hable con su médico para conseguir una nueva receta si todavía no tiene un inhalador nuevo.
- ▶ **Cuando el contador llegue a 0, será necesario sustituir el inhalador.**
- ▶ Si usa una cubierta protectora, consérvela para utilizarla con su próximo inhalador.

Si experimenta algún efecto secundario, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en el prospecto. También puede notificar los efectos secundarios directamente a través del Yellow Card Scheme (sistema de tarjeta amarilla de Reino Unido) en: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Al informar de efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad del medicamento.



Este material ha sido elaborado utilizando papel reciclado Febrero de 2025/EASYH-2018(2)c

Orion Pharma (UK) Ltd, Abbey Gardens,
4 Abbey Street, Reading, RG1 3BA, UK

